

apotekets

Graviditetstest

HURTIGT SVAR



Læs denne brugsanvisning, inden du foretager testen.

Resultatvindue Kontrolvindue

OM TESTEN

Apotekets Graviditetstest Hurtigt Svar finder hCG (humant choriogonadotropin), et hormon som stiger i de tidlige stadier af graviditeten. Følsomheden for testen er 25mIU/ml.

Over 99% nøjagtig når den anvendes fra dagen for forventet menstruation.



Test fra dagen for forventet menstruation



Test på et hvilket som helst tidspunkt på dagen



Undlad at drikke meget væske inden du tester.



Hold aldrig testpenen med den absorberende spids pegende opad.

1 UDFØR TESTEN

Tag testen ud af folieposen, tag beskyttelseshætten af og udfør testen med det samme. Test enten i:



urinstrålen i kun **10 sekunder**

eller




en opsamlet urinprøve i kun **20 sekunder**

Sæt beskyttelseshætten på igen og læg testen på en vandret flade med resultatvinduet opad.

2 VENT 5 MINUTTER*


før du aflæser resultatet.

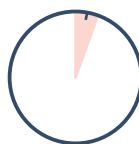


*Et 'gravid' resultat **kan** vise sig efter 40 sekunder, men du bør vente i 5 minutter for at bekræfte et 'ikke gravid' resultat.

3 AFLÆS DIT RESULTAT

En pink streg skal være synlig i kontrolvinduet. Aflæs **ikke** resultatet efter mere end 5 minutter.

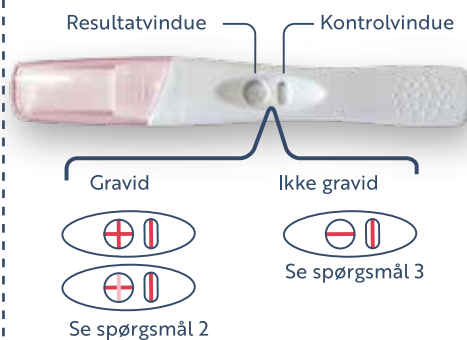

TESTFEJL

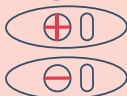

eller



Hvis der **ikke** er en pink streg i kontrolvinduet indenfor 5 minutter, så har testen ikke virket.

Hvad skal jeg gøre?

Hvis du får en testfejl, må du tage en ny test og være omhyggelig med at følge brugsanvisningen.

SPØRGSMÅL OG SVAR

1. Hvornår kan jeg teste?

Testen kan anvendes fra dagen for forventet menstruation. Graviditetshormonet hCG (Humant Choriogonadotropin) stiger kraftigt allerede tidligt i graviditeten og kan derfor måles i urinen. Apotekets Graviditetstest, hurtigt, har en følsomhed på 25mIU/ml

2. Min test viser 'Gravid'. Hvad skal jeg gøre?

Hvis dit resultat er 'Gravid' bør du kontakte din læge som kan vejlede dig om det videre forløb.

3. Min test viser 'Ikke gravid'. Hvad skal jeg gøre?

Det er muligt at du ikke er gravid, eller at dit graviditetshormonniveau endnu ikke er så højt, at det kan måles.

Test igen tre dage senere med en ny test.

Hvis denne test viser "ikke gravid" og din menstruation fortsat er udeblevet så kontakt din læge.

4. Hvad nu hvis jeg er usikker på mit resultat?

For at resultatet er 'Gravid', skal der være en pink streg i kontrolvinduet og et '+' symbol

i resultatvinduet indenfor 5 minutter efter, du har udført testen. Et lys pink '+' symbol i resultatvinduet er stadig et gravid resultat. Se spørgsmål 2.

Stregerne der danner '+' symbolet og strengen i kontrolvinduet bør have samme bredde. For at resultatet er 'Ikke gravid' skal der være en streg i kontrolvinduet og et '-' symbol i resultatvinduet indenfor 5 minutter efter, du har udført testen. Se spørgsmål 3.

5. Kan medicin eller medicinske tilstande påvirke testen?

Hvis du tager medicin bør du læse indlægssedlen fra producenten inden du tager en test. Hvis du får et uventet resultat bør du kontakte din læge. Medicin der indeholder hCG **kan** påvirke resultatet.

Anden fertilitetsmedicin (f.eks. clomifencitrat), smertestillende medicin og hormonal prævention (f.eks. p-piller) **burde ikke** påvirke resultatet.

Har du været gravid for nyligt (også selvom graviditeten ikke er fuldført), graviditet

udenfor livmoderen, cyster på æggestokken, overgangsalder og visse meget sjældne sygdomme **kan** påvirke resultatet.

6. Jeg har tidligere testet og fået et 'Gravid' resultat, men nu har jeg fået et 'Ikke gravid' resultat.

Hvis du har fået et 'Gravid' resultat, er det muligt, at du senere finder ud af, at du ikke er gravid på grund af et naturligt tab af graviditeten, som kan ske i de første tidlige stadier. Det er desværre ikke ualmindeligt og kan påvirke 1 ud af 4 graviditeter. De fleste kvinder vil få en helt normal graviditet efterfølgende.

7. Er der noget jeg skal gøre hvis jeg planlægger at blive gravid?

Sundhedsmyndighederne anbefaler: en sund kost, tilskud af folsyre eller vitaminer beregnet til kvinder der planlægger graviditet, undgå alkohol og undgå rygning. Kontakt din læge for vejledning om at opretholde en sund graviditet.

PLIGTTEKST

Anvendelse

Apotekets Graviditetstest Hurtig Svar er et EGENS One Step HCG Urin Test Kit, der er en hurtig kromatografisk immunanalyse til kvalitativ påvisning af humant choriongonadotropin (hCG) i urinprøver. Det er en let og enkel test til hjemme brug.

Graviditetshormonet

Graviditetstesten måler koncentrationen af hormonet Human Chorion Gonadotrophin (hCG), også kaldet graviditetshormonet. Tidligt i graviditeten begynder moderkagen at producere hCG. Hos ikke-gravide kvinder ligger koncentrationen af hCG typisk på 5 mIU/ml, og allerede på første dag efter udeblevet menstruation er koncentrationen oppe på 25mIU/ml eller mere. Som graviditet- en skrider frem stiger hCG niveauet til 100.000-200.000 mIU/ml. Derfor er måling af hCG i urinen en let og enkel både at undersøge om man er gravid

Teknologi

Analyse af hCG er en hurtig et-trins test baseret på immunokromatografisk teknologi. Den absorberende spids er fastgjort til en kromatografisk membran med en pude på en strimmel glasfiberpapir. Puden er imprægneret med et kolloidt konjugat af guldpartikler og monoklonale antistoffer mod hCG. Overskydende prøvevæske bliver absorberet i slutningen af den absorberende spids. Når urinprøven kommer i kontakt med den kromatografiske membran, opløser prøven det frysetørrede konjugat. Hvis testen er positiv vil hCG-antigenet binde sig til antistofferne i den kolloide opløsning. Når prøveopløsningen bevæger sig fremover på membranen, binder anti-hCG monoklonale antistoffer i testzonen på membranen sig til hCG-guld konjugat komplekset og danner en pink streg. Alle prøver vil danne en pink streg, når de når kontrolzonen på membranen, hvor prøveopløs-

ningen vil binde sig til polyklonale antistoffer (Anti-muse IgG) som er fæstet her. Tilstedeværelsen af denne linje indikerer, at testen er blevet udført korrekt.

Indhold

Hver pakning indeholder: 1 brugsanvisning og 1 forseglet aluminiumspose. Hver pose indeholder 1 graviditetstest og 1 pose tørremiddel

Pakningen indeholder ikke en timer.

Begrænsninger

Udføres testen for tidligt kan den give et falsk negativt resultat på grund af lavt hCG-niveau i urinen. I dette tilfælde skal testen gentages med en ny test, mindst 48 timer senere.

HCG-niveauer kan forblive påviselige i flere uger efter normal fødsel, fødsel med kejsersnit og spontan abort.

Hvis urinprøven er for fortyndet (fx hvis der er indtaget meget væske inden testen udføres) indeholder den muligvis ikke et repræsentativt niveau af hCG. Hvis der er forventning om graviditet, vent 48 timer med at teste igen og test gerne om morgenen.

Der er nogle situationer, som vil påvirke testresultatet: nogle stoffer; nogle sygdomme, f.eks. myom i livmoderen; kvinder i overgangsalderen samt høje koncentrationer af visse hormoner, såsom f LH, FSH og TSH. Kontakt længen hvis du er i tvivl om resultatet.

Følsomhed

Denne graviditetstest vil give et positivt resultat, ved hCG koncentrationer på 25mIU/ml eller højere.

Nøjagtighed

Sammenligningsundersøgelser med en lovligt markedsført graviditetstest er blevet udført internt og i et klinisk referencelaboratorium. Positive og negative resultater blev sammenlignet, og korrelationen var >99%.

Specificitet

Følgende forbindelser udviste ingen interferens, når de blev opløst i urin, som havde hCG-niveauer på 0 og 25 mIU/ml.

hLH	500mIU/ml
hFSH	1000mIU/ml
HTSH	1000 µIU/ml

Acetaminophen	20mg/dL
Eddikesyre	2000mg/dL
Ascorbinsyre	20mg/dL
B-hydroxybutyrat	2000mg/dL
Koffein	20mg/dL
Efedrin	20mg/dL
Gentisinsyre	20mg/dL
Phenylpropanolamin	20mg/dL
Salicylsyre	20mg/dL
Fenothiazin	20mg/dL
EDTA	80mg/dL
Acetylsalicylsyre	20mg/dL
Benzoyllecgonin	10mg/dL
Cannabinol	10mg/dL
Kodein	6µg/dL
Ethanol	1.0%
Methanol	10%
Albumin	2000mg/dL
Glukose	2000mg/dL
Bilirubin	2mg/dL
Atropin	20mg/dL
Estriol-17-beta	1400ug/dL
Hæmoglobin	500mg/dL
Pregnanediol	1500ug/dL
Thiophen	20mg/dL
Ampicillin	20mg/dL
Tetracyclin	20mg/dL
Ketonstoffer	20mg/dL

Litteraturliste

1. Batzer, F.R. Fertility & Sterility, Vol 34, 1 1980
2. Catt, K.J. Dufan, M.L. and vaitukaitis, J.L. J.
3. Clin. Endocrinol Metab., Vol. 40,537, 1975
4. Braunstein, G.D., Rasor, J., Alder, D., Danzer H.,
5. Wade, M.E. Am. J. Obstet. Gynecol., Vo. 126,678,1976
6. Lenton, E.A., Neal L.M., Sulaiman, R. Fertility and Sterility, Vol. 37,773, 1982
7. Batzer, F.R. Fertility & Sterility, Vol, 34, 1 1980
8. Dawood, M.Y., Sexeba, B.B., and Lanesman, R. Ob. Gyn. Vol. 126, 678, 1976
9. Braustein, G.D., et Al. AM. Inter. Med. Vol. 78, pp. 419-439, 1980
10. Uotila, M., Ruoslahti, E. And Engvall, H.J. Immunol. Methods, Vol. 42, 11, 1981
11. C. Galfre, S.C. Howe, C. Milstein, G.N. Butcher, and J. C. Howard, Nature 266, 550, 1977
12. M.N. Iscove and F. Melchers, J. Exp Med. 147, 923, 1978
13. PL.,Ey,et.AL,Immunochemistry 15,429,1978

IVD	Medicinsk udstyr til <i>in vitro</i> diagnosticering		Se instruktioner for anvendelse
LOT	Batchnummer		Opbevares mellem 4-30°C
	Udløbsdato		Må ikke genbruges
	Fabrikant		Opbevares tørt
EC/REP	Autoriseret EU repræsentant		Beskyttes mod direkte sollys

- Til selvtest derhjemme.
- Kun til *in vitro* diagnosticering.
- Opbevares mellem 4-30°C.
- Hvis opbevaret i køleskab så vent med at teste til efter 30 min ved stuetemperatur.
- Ikke til indvendig brug.
- Hold udenfor børns rækkevidde.
- Må ikke genbruges.
- Må ikke bruges, hvis foliepakningen er skadet.
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- Kasserer sammen med husholdningsaffald

Skil ikke testen ad. Indeholder smådele. Spis ikke nogle dele af testen. Hvis slugt ved et uheld, så søg lægehjælp.

Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd
Building 15, Building 12 (west), No. 1692 Xinghu Avenue,
Nantong Economy & Technology Development Zone,
226010 Nantong, P.R. china

Shanghai International Holding corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, D- 20537 Hamburg, Germany

Distributør
Apotekernes A.m.b.a.
Mileparken 20E, 2740 Skovlunde
apotekets.dk



0123